

UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 731/SYT-NVYD

Kiên Giang, ngày 23 tháng 3 năm 2020

V/v chỉ đạo đeo khẩu trang phòng,
chống bệnh COVID-19

Kính gửi:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Trung tâm Y tế huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 1360/BYT-MT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống bệnh COVID-19; (Hướng dẫn gửi kèm theo công văn này và được cập nhật tại website <http://nCov.moh.gov.vn>);

Để phòng tránh lây lan dịch bệnh tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và chỉ đạo phòng/khoa, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nội dung sau:

- Tổ chức phổ biến nội dung Hướng dẫn cho người dân và cho cộng đồng.


- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thông tin truyền thông, báo chí, đài phát thanh và truyền hình trên địa bàn tổ chức tuyên truyền cho người dân và cộng đồng Hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách và hiệu quả phòng chống dịch bệnh COVID-19;

Giao cho Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tổng hợp báo cáo và kịp thời thông tin, phản ánh các vướng mắc về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế), UBND tỉnh, Sở Y tế.

Sở Y tế thông báo đến đơn vị biết, thực hiện./. *M/*

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ SYT;
- Trang TTĐT SYT;
- Lưu: VT, csthuân.

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trúc Giang
Nguyễn Trúc Giang

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng phòng chống COVID -19



1. Việc sử dụng khẩu trang giúp phòng tránh lây nhiễm chỉ khi kết hợp với việc thường xuyên rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn. Phải biết cách sử dụng và thải bỏ khẩu trang đúng cách.

2. Cách đeo khẩu trang

- Bước 1: Rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn trước khi đeo khẩu trang.

- Bước 2: Xác định phần trên, dưới của khẩu trang. Xác định mặt trong, ngoài theo đường may hoặc mặt đậm hơn ở bên ngoài.

- Bước 3: Đeo và điều chỉnh để khẩu trang che kín mũi, miệng đảm bảo không có khe hở giữa mặt và khẩu trang

Lưu ý: Không chạm tay vào mặt ngoài khẩu trang trong suốt quá trình sử dụng. Nếu chạm vào phải rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn.

3. Cách thải bỏ khẩu trang:

- Bước 1: Khi tháo khẩu trang chỉ cầm phần dây đeo sau tai (không chạm vào mặt ngoài của khẩu trang).

- Bước 2: Bỏ khẩu trang vào túi kín (nếu có) và/hoặc bỏ vào thùng rác có nắp đậy kín đối với khẩu trang dùng 1 lần.

- Bước 3: Rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn.

Lưu ý: Thay hoặc thải bỏ khẩu trang sau: mỗi lần sử dụng hoặc khi bị bẩn, thấm nước. Tuyệt đối không dùng lại đối với khẩu trang dùng 1 lần. Với khẩu trang được sử dụng nhiều lần, phải giặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất sau mỗi lần sử dụng.